



Biodynamické působení adhezivní elastické pásky je podpořeno účinkem:

Při pooperační, traumatické, artritické, revmatické a neuropatické bolesti.
Při léčbě myalgií, kontraktury, natržení, natažení.

DOLAREN® TEJPOVACÍ PÁSKA S OPAKOVANOU AKTIVACÍ je revoluční produkt. Je vyrobena mikrobičkami s možností opětovné aktivace pomocí DOLAREN® emulgelu nebo NEUROSIODOL® emulgelu podle typu ošetřované indikace. Skládá se z 96 % bavlny a koloidních látek z léčivých rostlin s elastickoretikulární strukturou.

HLAVNÍ SLOŽKY

Tkanina: 96 % bavlna, 4% polyuretan

Emulgel: OZOILE® (stabilní ozonidy), extrakt z květu arniky horské, extrakt z kořene harpagofytu, extrakt z listu černého rybzu, bromelain, panthenol, menthol, extrakt z boswellie (kadidlovník pilovitý)

OZOILE® je exkluzivní složka obsažená v elastickoretikulární struktuře tejpovací pásky DOLAREN® s opakovanou aktivací. OZOILE® má ochranný účinek, působí proti zánětu a svědění, působí proti hypoxii, oxidačnímu stresu a degenerativním procesům. Obnovuje funkci kloubního a svalového aparátu.

HARPAGOFYT (DÁBLŮV DRÁP)

Protizánětlivý, analgetický a antirevmatický účinek.

BROMELAIN

Protiedémový a fibrinolytický účinek.

ARNIKA HORSKÁ

Působí proti hematomům a otokům.

ČERNÝ RYBÍZ (RIBES NIGRUM)

Vazoprotektivní a protizánětlivý účinky.

EXTRAKT Z BOSWELLIA SERRATA (KADIDLOVNÍK PILOVITÝ)

Zmírňuje zánět spojený s artritidou a artrozou.

INDIKACE

DOLAREN® TEJPOVACÍ PÁSKA S OPAKOVANOU AKTIVACÍ s OZOILE® se používá při léčbě následujících stavů a obtíží: vestibální patologie, diskové patologie, svalové, šlachové a kloubní potíže, artróza, artritida, bolesti hlavy, pooperační potíže a jiné patologické stavy. DOLAREN® TEJPOVACÍ PÁSKU S OPAKOVANOU AKTIVACÍ s OZOILE® lze rovněž použít jako doplněk a udržovací prostředek v rámci různých fyzioterapeutických terapií.

JAK POUŽÍVAT

DOLAREN® TEJPOVACÍ PÁSKU S OPAKOVANOU AKTIVACÍ s OZOILE® se musí aplikovat na čistou, suchou a odmaštěnou pokožku. Specifická technika použití se liší v závislosti na oblasti aplikace a účelu použití. Po 12 hodinách od aplikace znovu aktivujete mikrobičky nanesením emulgelu DOLAREN® nebo NEUROSIODOL® na pásku. Tento postup opakujte každých 12 hodin. DOLAREN® TEJPOVACÍ PÁSKU S OPAKOVANOU AKTIVACÍ s OZOILE® odstráňte ve chvíli, kdy ztratí přilnavost.

APLIKACE RAMENO

1. Natáhněte paži dopředu. Připevněte pásku na dolní část deltového svalu a vedte ji směrem nahoru po zadní straně ramene.

2. Natáhněte paži dozadu. Připevněte druhý pásky proužek na dolní část deltového svalu. Vedte pásku po přední straně ramene směrem nahoru.

KRK A RAMENO

1. Nakloňte krk na opačnou stranu od poraněného ramene. Připevněte pásku na horní část krku a vedte ji směrem dolů k rameni.

2. Totéž opakujte na opačné straně.

3. Po aplikaci pásky pevně přitlačte, aby došlo k aktivaci adhezivní vrstvy.


KRK

1. Nakloňte hlavu dopředu, aby došlo k protažení zadní části krku.

2. Pložitě proužky pásky na obě strany vedle páteře.
3. Pokud je bolest výrazná, přiložte další pásku podél linie postižené oblasti pro zvýšenou oporu.

ZÁPĚSTÍ

1. Natáhněte paži a mírně ohněte zápěstí směrem dozadu. Přiložte pásku ve tvaru „I“ z přední části zápěstí až po loket.
2. Omotejte kolem zápěstí polovinu pásky tak, aby mezi konci zůstal malý rozestup.

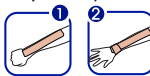

ZÁDA

1. Předkloňte trup dopředu. Připevněte pásku do oblasti dolní části zad těsně vedle páteře a vedte ji směrem vzhůru.
2. Přiložte druhý proužek na opačnou stranu páteře.
3. Přiložte třetí pásku vodorovně přes obě předešlé pásky v oblasti bolesti.



KOLENO

1. Pokrčte koleno a připevněte pásku v jeho oblasti. Vedte ji směrem nahoru po zevní straně kolene.
2. Totéž opakujte na druhé straně.



KOTNÍK

1. Pokrčte koleno a připevněte dlouhou pásku na zevní stranu střední části lýtky. Vedte ji dolů v zakřiveném tvaru písmene „L“.
2. Přiložte krátký proužek kolem kotníku.



LÝTKO

1. Nahněte kotník dopředu. Připevněte pásku ve tvaru „Y“ na patu a vedte její konce podél vnitřní a vnější strany lýtky směrem vzhůru.
2. Pro vyšší účinnost přiložte druhý proužek svisle podél středu lýtky.



UPOZORNĚNÍ

Pouze k vnějšímu použití. Nepožívejte. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte, pokud je obal poškozen. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. Datum spotřeby se vztahuje na neporušený a správně skladovaný produkt. Skladujte na chladném a suchém místě mimo zdroje tepla a přímého slunečního záření. Uchovávejte nejlépe mezi 5 °C a 35 °C. Před použitím zdravotnického prostředku si dobře umyjte ruce. Po otevření se doporučuje výrobek spotřebovat do 6 měsíců. DOLAREN® TEJPOVACÍ PÁSKU S OPAKOVANOU AKTIVACÍ s OZOILE® je dobře snášena. Nejsou známy žádné případy senzibilizace ani nežádoucích účinků. Nepoužívejte v případě zjištěné přecitlivělosti na přípravek nebo některou z jeho složek. V případě výskytu takového jevu přerušte používání a poradte se s lékařem.

BALENÍ

Role 5 cm × 5 m

BEZ LEPKU - BEZ LATEXU - HYPOALERGENNÍ - VODĚODOLNÁ



REV.03 12/2022

ERBAGIL s.r.l.
Via L. Settembrini, 13
82037 Telesse Terme (BN) Italy
www.erbagil.com

EMPOLAS
Výhradní distributor pro ČR a SR:
EMPOLAS s.r.o.
Česká republika
info@empolas.com
www.ozonidy.cz

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK

DOLAREN®

TEJPOVACIA PÁSKA
S OPAKOVANOU AKTIVÁCIOU

Biodynamické pôsobenie adhezívnej elastickej pásky je podpořeno účinkom:

Pri pooperačnej, traumatickej, artritckej, reumatickej a neuropatickej bolesti.
Pri liečbe myalgií: kontraktúry, natrhnutie, natiahnutia.

DOLAREN® TEJPOVACIA PÁSKA S OPAKOVANOU AKTIVÁCIOU je revolučný produkt. Je vybavená mikrobunkami s možnosťou opätovnej aktivácie pomocou DOLAREN® emulgelu alebo NEUROSIODOL® emulgelu podľa typu ošetrovanej indikácie. Je tvorená z 96 % bavlny a koloidnými látkami z liečivých rastlín s elastickoretikulárnymi štruktúrou.

HLAVNÉ ZLOŽKY

Tkanina: 96 % bavlna, 4 % polyuretán

Emgel: OZOILE® (stabilné ozonidy), extrakt z kvetu arniky horskej, extrakt z koreňa harpagofytu, extrakt z listu čiernych ríbezlí, bromelain, panthenol, mentol, extrakt z boswellie (kadidlovník pilovity) OZOILE® je patentovaná zložka obsiahnutá v mikrobunkách elastickoretikulárnej štruktúry DOLAREN® TEJPOVACEJ PÁSKY S OPAKOVANOU AKTIVÁCI S OZOILE® má ochranný, protizápalový a protisvrbiťový účinok, pôsobí proti hypoxii, oxidačnému stresu a degeneratívnym procesom. Obnovuje funkciu kĺbov a svalového aparátu.

HARPAGOFYT (CERTOV PAZÚR)

Protizápalový, analgetický a protireumatický účinok.

BROMELAIN

Protidémový a fibrinolytický účinok.

ARNIKA HORSKÁ

Pôsobí proti hematómom a opuchom.

ČIERNE RÍBEZLE (RIBES NIGRUM)

Vazoprotektívne a protizápalové účinky.

EXTRAKT Z BOSWELLIA SERRATA (KADIDLOVNÍK PILOVITÝ)

Zmierňuje zápal spojený s artritídou a artrózou.

INDIKÁCIE

DOLAREN® TEJPOVACEJ PÁSKY S OPAKOVANOU AKTIVÁCI S OZOILE® sa používa pri liečbe nasledujúcich stavov a ťažkostí: vertebálne ochorenia, diskové ochorenia, svalové, šlachové a kĺbové problémy, artróza, artritída, bolesti hlavy, pooperačné ťažkosti a iné patologické stavy. DOLAREN® TEJPOVACEJ PÁSKY S OPAKOVANOU AKTIVÁCI S OZOILE® je možné použiť aj ako doplnok a udržiavací prostriedok v rámci rôznych fyzioterapeutických terapií.

AKO POUŽÍVAŤ

DOLAREN® TEJPOVACEJ PÁSKY S OPAKOVANOU AKTIVÁCI S OZOILE® sa musí aplikovať na čistú, suchú a odmastenú pokožku. Špecifická technika použitia sa líši v závislosti od oblasti aplikácie a účelu použitia. Po 12 hodinách od aplikácie znovu aktivujte mikrobunky nanesením emulgelu DOLAREN® alebo NEUROSIODOL® na pásku. Tento postup opakujte každých 12 hodín. DOLAREN® tejpovaciu pásku s opakovanou aktiváciou s OZOILE® odstráňte v momente, keď stratí prílnosť.

APLIKÁCIA RAMENA

1. Natiahnite ruku dopredu. Prilepte pásku na dolnú časť delťového svalu a vedte ju smerom nahor po zadnej strane ramena.

2. Natiahnite ruku dozadu. Prilepte druhý prúžok pásy na dolnú časť delťového svalu a vedte ju smerom nahor po prednej strane ramena.

KRK A RAMENO

1. Nakloňte krk na opačnú stranu od poranenia ramena. Prilepte pásku na hornú časť krku a vedte ju smerom dole k ramenu.

2. To isté zopakujte na opačnej strane.

3. Po aplikácii pásy pevne pritlačte, aby sa aktivovala adhézna vrstva.

KRK

1. Nakloňte hlavu dopredu, aby došlo k pretiahnutiu zadnej časti krku.

BIODYNAMICKÁ TEJPOVACIA PÁSKA
S DVOJITÝM TERAPEUTICKÝM ÚČINCOM Vďaka

MIKROBUNKÁM S OPAKOVANOU AKTIVÁCIOU

PATENT ERBAGIL



2. Priložte prúžky pásy po oboch stranách vedľa chrbtice.

3. Ak je bolesť výrazná, priložte ďalšiu pásku pozdĺž línie postihnutej oblasti na zvýšenie opory.



ZÁPÄSTIE

1. Natiahnite ruku a mierne ohnite zápästie smerom dozadu. Priložte pásku v tvare „I“ z prednej strany zápästia až po lakteť.

2. Omotajte okolo zápästia polovicu pásy tak, aby medzi koncami zostala malá medzera.



CHRBTICA

1. Predkloňte trup dopredu. Prilepte pásku do oblasti dolnej časti chrbta tesne vedľa chrbtice a vedte ju smerom nahor.

2. Priložte druhý prúžok na opačnú stranu chrbtice.

3. Priložte tretí pásik vodorovne cez obe predchádzajúce pásy v oblasti bolesti.



KOLENO

1. Pokrčte koleno a prilepte dlhú pásku v jeho oblasti.

Vedte ju smerom nahor po vonkajšej strane kolena.



2. To isté zopakujte na druhej strane.



ČLENOK

1. Pokrčte koleno a prilepte dlhú pásku na vonkajšiu stranu strednej časti lýtky. Vedte ju nadol v zakrivenom tvare písmena „L“.

2. Priložte krátky prúžok okolo členka.

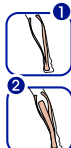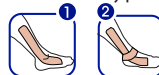

LÝTKO

1. Predkloňte členok dopredu. Prilepte pásku v tvare „Y“ na pätu a vedte jej konce pozdĺž vnútornej a vonkajšej strany lýtky smerom nahor.

2. Pre vyšší účinok priložte druhý pásik zvisle pozdĺž stredu lýtky.

UPOZORNENIE

Len na vonkajšie použitie. Neprehŕtajte. Uchovávať mimo dosahu detí. Nepoužívajte, ak je obal poškodený. Nepoužívajte po uplynutí doby použiteľnosti. Dátum spotreby sa vzťahuje na neporušený a správne skladovaný výrobok. Uchovávať na chladnom a suchom mieste, mimo zdrojov tepla a priameho slnečného žiarenia. Uchovávať ideálne pri teplote medzi 5 °C a 35 °C. Pred použitím zdravotníckej pomôcky sú dôkladne umyte ruky. Po otvorení sa odporúča výrobok spotrebovať do 6 mesiacov. RIGENOMA® TEJPOVACIA PÁSKA S OPAKOVANOU AKTIVÁCI S OZOILE® je dobre znášaná. Nie sú známe žiadne prípady senzibilizácie ani nežiaduce účinky. Nepoužívajte v prípade známej precitlivenosti na výrobok alebo niektorú z jeho zložiek. V prípade výskytu takéhoto javu prerušte používanie a poraďte sa s lekárom.

BALENIE

Rolla 5 cm × 5 m



REV.03 12/2022

ERBAGIL s.r.l.
Via L. Settembrini, 13
82037 Telese Terme (BN) Italy
www.erbagil.com

EMPOLAS
Výhradný distributor pre ČR a SR: EMPOLAS s.r.o.
Eška republika
empolas.com
www.ozonidy.sk

REV.03 12/2022

ZDRAVOTNICA POMÔCKA